



MEDDESIGN

Pessare

Erfolgreich gegen Inkontinenz
und Deszensus



MODERNE PESSARTHERAPIE

MODERNES MATERIAL, GUTE VERTRÄGLICHKEIT.

- **Früher:** Pessare bestanden aus hartem, unflexiblem Material wie Holz, Porzellan oder Hartgummi. Pessare konnten nur von einem Arzt eingeführt werden
- **Heute:** Pessare sind aus Silikon, Frauen können die Pessare morgens nach der Körperpflege selbst einsetzen und abends vor dem Schlafen wieder entfernen

MODERNE PESSARTHERAPIE

ANWENDUNG IN GUTEN HÄNDEN: IHREN EIGENEN!

- **Vorteile:**

- ◇ Weniger Arzt Termine
- ◇ So gut wie gar keine Druckgeschwüre
- ◇ Keine Stauung des Scheidenwand- und Muttermundsekrets
→ keine Infektionen
- ◇ Nicht spürbar für die Trägerin

WAS FÜR PESSARE GIBT ES?

*UNTERSCHIEDLICHE DESIGNS FÜR
VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE.
FÜR JEDE FRAU DAS RICHTIGE PESSAR.*




Cerclage-Pessar



Cerclage-Pessar
Hamann & Jorde

CERCLAGE-PESSAR

Zur Entlastung und sakralen Ausrichtung des Muttermundes bei Schwangeren (z. B. für Frühgeburts-Prophylaxe oder Mehrlingsgeburt)

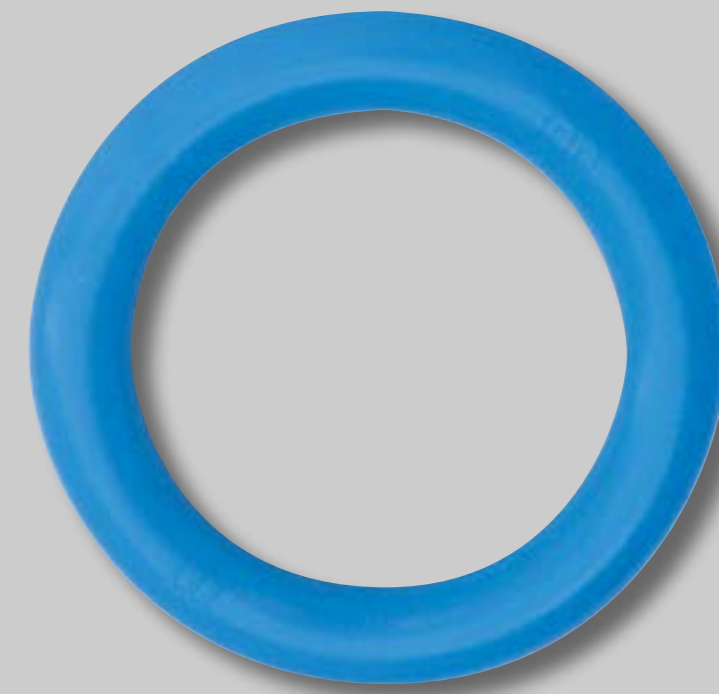


Dünn



Dick

RING PESSAR

Bei Stressinkontinenz oder leichten Senkungsbeschwerden

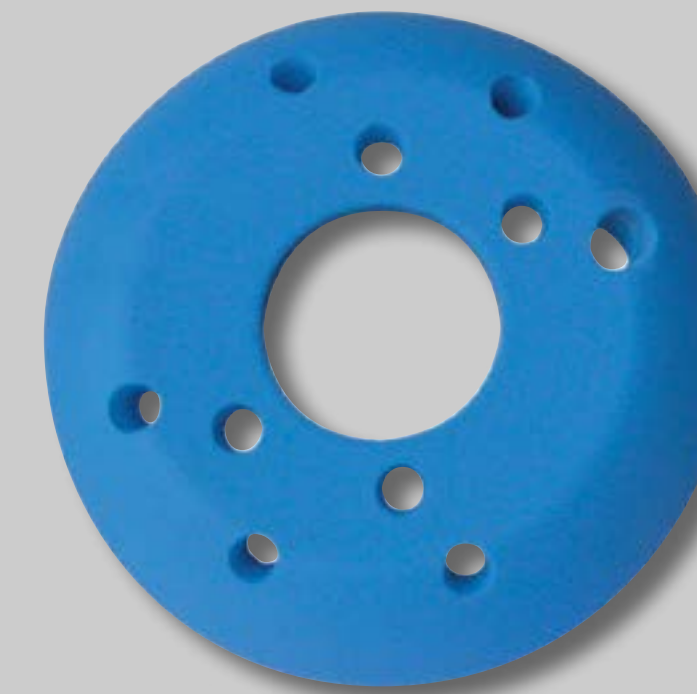

Siebschalen Pessar



Siebschalen Pessar EF


SIEBSCHALEN PESSAR

Bei Stressinkontinenz oder leichten Senkungsbeschwerden



KEULEN PESSAR

Bei Scheiden- und Gebärmuttervorfall,
wenn normale Pessare dem Druck nicht
standhalten

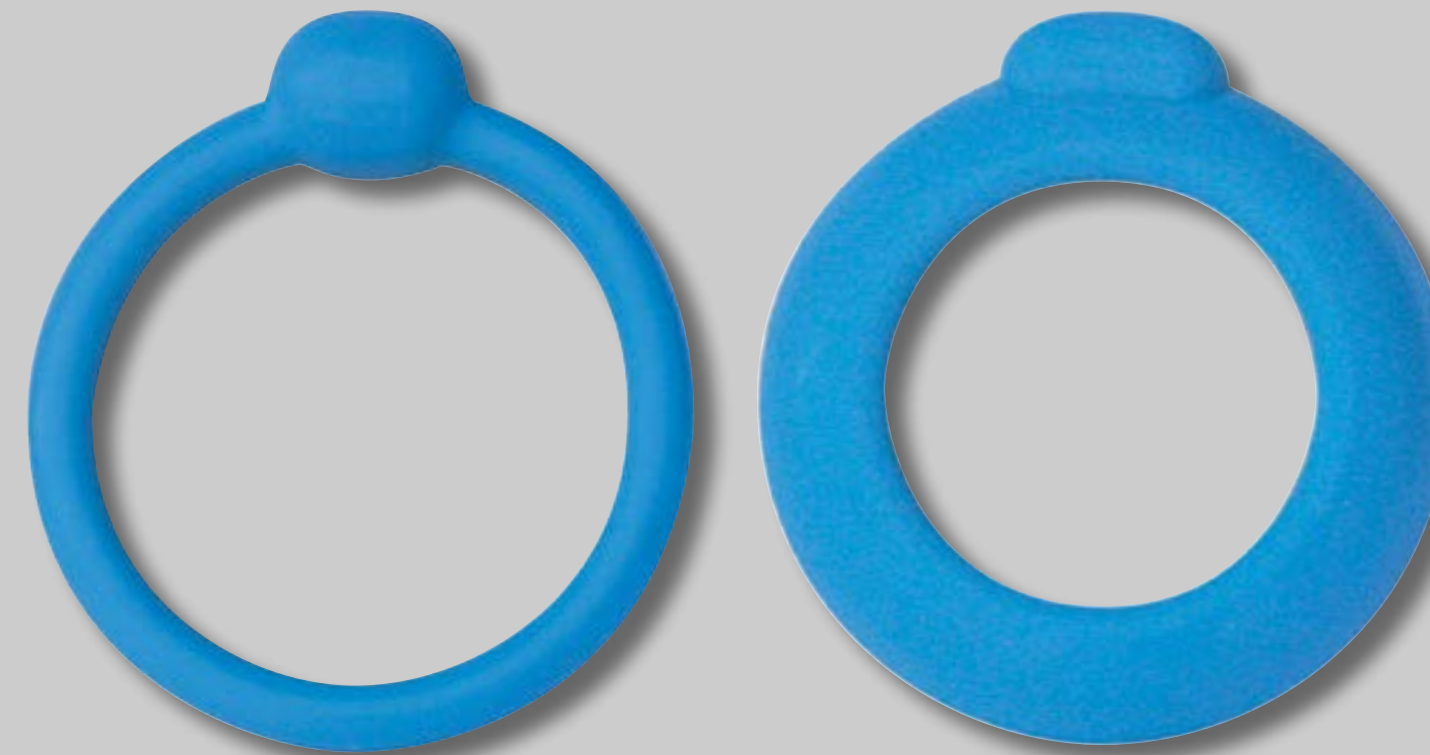


Urethra Pessar

Urethra Schalen Pessar

URETHRA PESSAR

Bei Stressinkontinenz oder Mischformen
von Stress- und Urgeinkontinenz

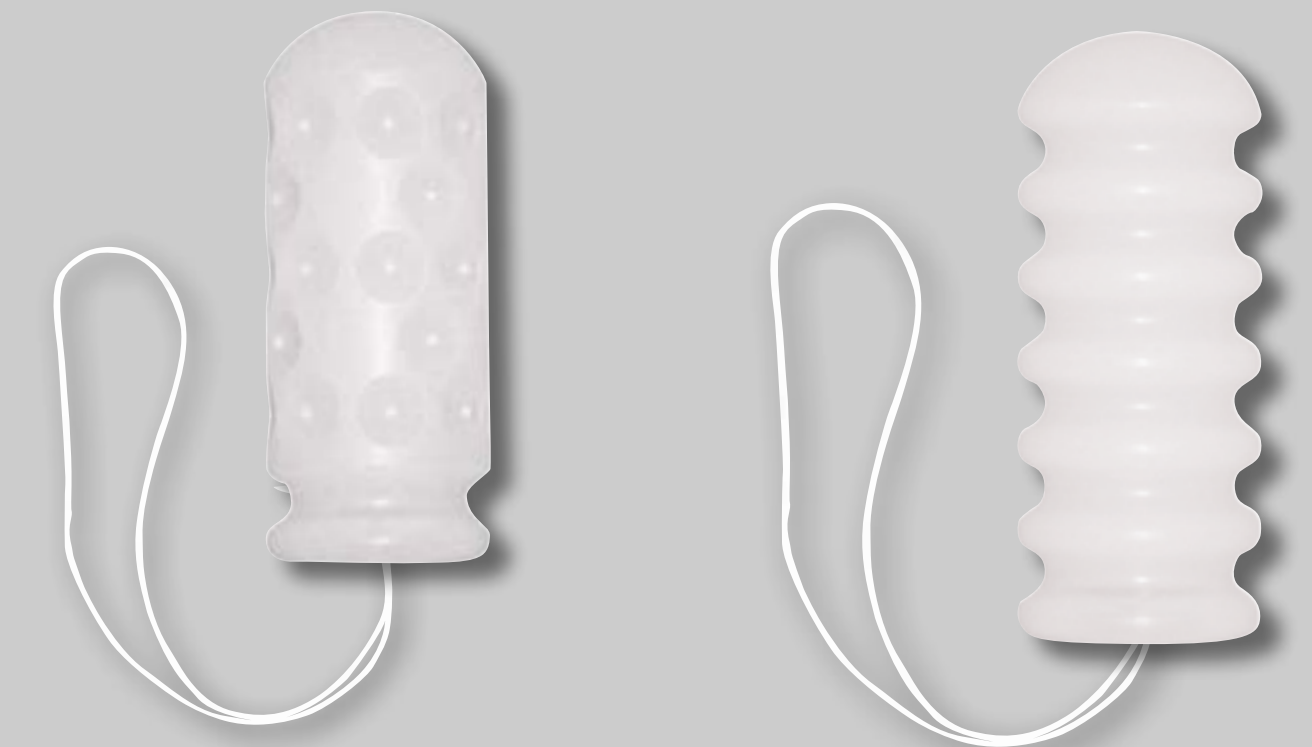

Typ-B


Typ-R

T-PESSAR


Bei Stressinkontinenz oder leichten
Senkungsbeschwerden



Würfel Pessar

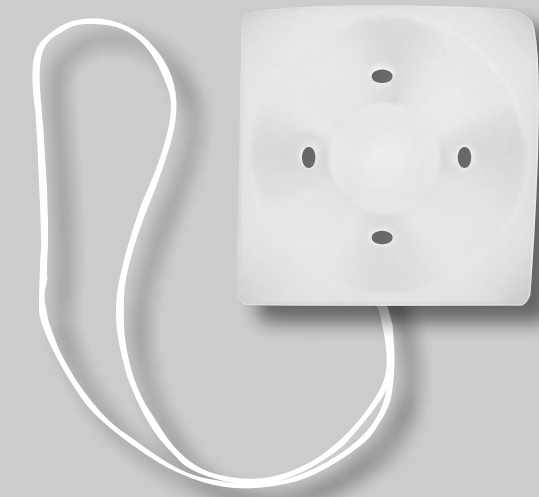

Würfel Pessar RV

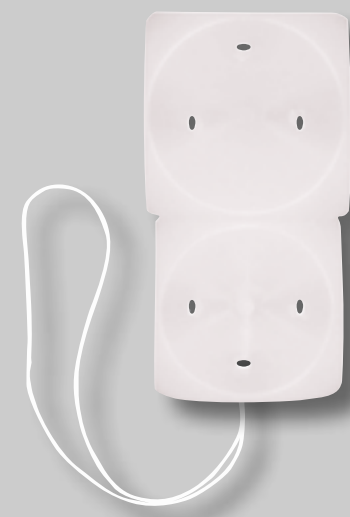

Tandem Würfel Pessar

WÜRFEL PESSAR

Bei Stressinkontinenz oder verschiedenen Graden der Scheiden- und Gebärmutter-senkung



CRAMER-PESSAR

Zur Behandlung der Stressinkontinenz und bei Beschwerden, die durch eine Senkung von Scheide, Gebärmutter und Blase entstehen



INKONTINENZTAMPON- PESSAR TYP C

Bei Stressinkontinenz oder leichten Senkungsbeschwerden

Inhalt:

4 medesign Pessare inkl. Anleitung,
Wiederaufbereitungsanleitung und
Ladysoft als medizinisches Gleitgel



PESSAR ANPASS-SETS

- Ermöglichen eine individuelle Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis
- Enthalten: 4 unterschiedliche Größen
- Bestehen aus medizinischen Silikon und sind biologisch geprüft
- Sterilisiertes Silikon: Anwendung an mehrere Patienten (Wiederaufbereitungsanleitung)

FÜR WELCHE FRAUEN SIND PESSARE GEEIGNET? (1)

BEI GESUNDHEITLICHEN PROBLEMEN ...

- Senkungsbeschwerden und Urininkontinenz
- Operation so spät wie möglich
- Hohes Narkoserisiko
- Leichte Senkung, die nicht operationspflichtig ist, aber Beschwerden verursacht
- Senkungsbeschwerden oder Inkontinenz, mit Aussicht auf (weitere) Kinder
- Mehrgebärende Frauen, für die letzten Monate der Schwangerschaft gegen unwillkürlichen Urinverlust

FÜR WELCHE FRAUEN SIND PESSARE GEEIGNET? (2)

*... ODER BEIM SPORT, DAS PASSENDE PESSAR
LÄSST SIE AKTIVER WERDEN.*

- Urinverlust bei sportlichen Aktivitäten; beim Joggen, beim Volleyball, Tennis etc.

EINFÜHREN / WAS IST ZU BEACHTEN?

EINFACH EINSETZEN ...

1. Blase soll entleert sein
2. Hände gut waschen (Seifenreste gut abwaschen)
3. Pessar mit Gleitgel oder estriolhaltigen Creme bestreichen (Mit Arzt abklären)
4. Schamlippen mit der einen Hand spreizen, mit der anderen das Pessar kräftig zusammen drücken

5. Pessar entweder in der Hocke, oder mit einem höher gestellten Bein oder in Rückenlage mit angewinkelten Beinen einführen
6. Pessar in Richtung Kreuzbein vorschieben, bis es nicht mehr weiter geht
7. Das Pessar sitzt richtig wenn es den ganzen Tag nicht gespürt wird

ENTFERNEN / WAS IST ZU BEACHTEN?

... UND WIEDER ENTFERNEN

ENTFERNEN EINES WÜRFEL PESSARS

1. Mit der einen Hand an dem Rückholfaden ziehen
2. Löst sich der Würfel nicht gleich ab: Mit dem Zeigefinger der anderen Hand zwischen die hintere Scheidenwand und den Würfel gehen, ein schmatzendes Geräusch zeigt, dass sich der Würfel festgesaugt hatte
3. Würfel kann herausgezogen werden

ENTFERNEN EINES RUNDEN PESSARS

1. Entlang tasten an der Scheidenvorderwand, bis der Rand gefühlt wird
2. Zwischen vorderer Vaginalwand und Pessar eingehen und das Pessar um die Längsachse der Scheide etwas drehen
3. Mit dem Zeigefinger in die Öffnung des Rings einhaken und ziehen
4. Oder: Das Pessar mit Daumen und Zeigefingern fassen und entfernen

PFLEGE DES PESSARS

HEGE UND PFLEGE DES PESSARS.

- Nach Gebrauch mit milder Seife und warmen Wasser gut abwaschen, Seifenreste achtsam abwaschen
- Täglicher Gebrauch: An einem luftigen Ort oder in einem größeren Badezimmerschrankfach trocknen
- Auf Reisen: In einem geschlossenen Behälter verwahren
- Scheideninfekt: Pessar auskochen um es Keimfrei zu machen

WANN BRAUCHE ICH EIN NEUES?

*FÜR OPTIMALE LEBENSDAUER UND
PASSGENAUIGKEIT.*

- Mittlere Lebensdauer bei täglichen Gebrauch: **ca. 6 – 9 Monate**
- Bei nicht täglichen Gebrauch: etwas länger
- Risse im Pessar → **Austauschen**
- Leichte Verfärbungen, durch Hämoglobin (Blutfarbstoff der mit der Menstruation in die Scheide gelangt)
→ **Beeinträchtigen die Lebensdauer nicht**



MEDESIGN

**Wünscht eine gute Zeit ...
Kommen Sie vorbei.**

dietramszeller straße 6 • 83623 dietramszell - linden • deutschland

www.medesign.de • info@medesign.de

